



江苏迈德乐医疗科技
JiangSu MaiDeLe Medical Technology

鼻 润 津

鼻腔喷剂敷料

江苏迈德乐医疗科技



江苏迈德乐医疗科技
JiangSu MaiDeLe Medical Technology

公司介绍

迈德乐医疗科技有限公司是一家专注医疗器械研发、生产和经营公司，公司拥有博士生一名，研究生2名，本科以上学历占90%，公司建筑面积1500平方米，依照行业标准建立十万级洁净厂房，拥有全自动生产设备。按照YY13485建立质量管理体系，拥有超过90个标准程序文件，规范人员设施完整性和规范性。

公司秉承自主创新的精神，现有产品耳、鼻、喉喷剂敷料，拥有独家技术，目前已注册备案产品6个，每年4-6个新品申报速度快速发展。

“绿色产业，奉献健康”是我们的宗旨。迈德乐将不断前行，为人类奉献健康生活。



江苏迈德乐医疗科技
JiangSu MaiDeLe Medical Technology

目 录 /CONTENTS

01

鼻润津研发背景及特点

02

鼻润津基础与临床研究

03

鼻润津适用人群及用法



1、鼻润津（鼻腔喷剂敷料）研发背景及特点

鼻润津由氯化钠、透明质酸钠（大分子）、PHMB、纯化水等物质组成的液体敷料；
工艺处方不含激素

长时间使用激素后（15天左右），患者经常出现**鼻腔干燥，鼻出血等鼻黏膜受损表现**，而且也会影响纤毛摆动。

激素的使用会对鼻黏膜造成损伤，降低鼻黏膜防御功能
鉴于以上不良作用，鼻润津从研发开始秉承绿色健康理念，
工艺处方经过多次研究实验，最终开发出**不含任何激素成分**的一鼻润津

鼻润津

坚持使用（1-2周左右），患者受损鼻粘膜无明显出血，逐渐恢复健康状态，鼻炎患者呼吸顺畅，精神状态显著改善


2、鼻润津基础与临床研究

透明质酸钠

透明质酸(Hyaluronic Acid,HA) ,又名玻璃酸、玻尿酸,是一种以葡萄糖醛酸和N-乙酰氨基葡萄糖胺为双糖单位交替连接而成的黏多糖,一般是白色的无定型固体,无色无味,透明质酸吸水能力非常强,亲和吸附的水分约为本身质量的500-1000倍,所以它是公认的天然保湿因子,可有效修复受损鼻粘膜。




透明质酸钠分子结构式

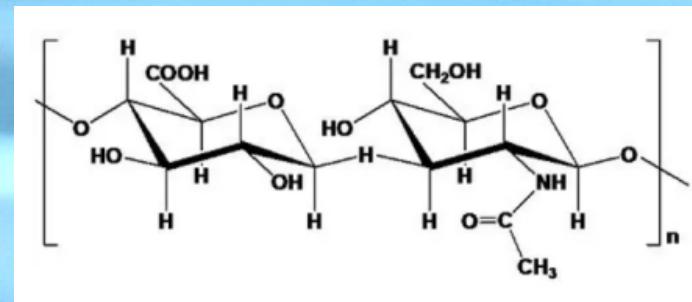

PHMB作用方式、机理:

快速攻击细菌表面
集结于该表面
击穿细胞保护墙
攻击细菌细胞质膜
最终达到抑菌、修复

PHMB分子结构式

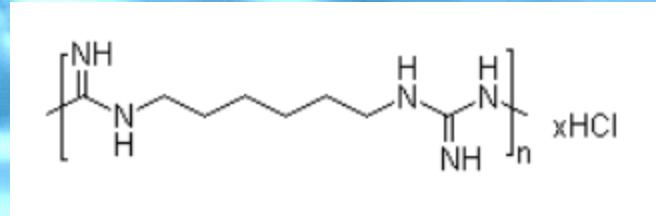



江苏迈德乐医疗科技
JiangSu MaiDeLe Medical Technology

3、鼻润津（喷剂敷料）适用人群及用法

【预期用途】

预期用途为通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用，缓解鼻腔不适，修复鼻黏膜，湿润鼻腔、加强鼻黏膜防护作用，减少鼻炎复发；加强纤毛粘液系统的排除功能，促进鼻窦炎向愈；缓解鼻塞、流清涕症状，防止感冒症状加重，可联合感冒药使用。



**过敏性鼻炎
鼻腔术中、术后
各种急性、慢性鼻炎**

【适宜人群】

适用于成人或儿童各种小型创面，包括急、慢性鼻炎症状的成人和儿童。





江苏迈德乐医疗科技
JiangSu MaiDeLe Medical Technology

鼻润津（喷剂敷料）使用方法

正确使用方法： 特别提醒：为保证效果，请边喷边吸。

步骤一：



首次使用时排出空气，将瓶体置于手中，
拇指抵住瓶底，食指、中指按住泵体凸处；

步骤二：



头微微抬起，将泵口缓慢放入鼻腔，
两指按住凸处往下压2-3次，可咽下；

步骤三：



换另一侧鼻孔，重复步骤2。
使用次数依个人症状而定，推荐每日4次。